

Mesmo bons produtos podem ser melhorados!

PAIN T ACRYL

Polímero em pó ultrafino

Planejado para ser utilizado com pincel, o PaintAcryl™ é uma resina autopolimerizável para a confecção de coroas e pontes, coroas telescópicas, estruturas and supraestruturas, pontes adesivas, barras linguais e palatais, pontes adesivas, conectores de grampos, etc.


Qualidades	X	Benefícios
Resistente e Preciso		Durável
Baixa Contração		Ótima e Fiel Adaptação
Polímero em Pó Ultrafino		Fácil Modelagem
4 min. para Polimerização		Economia de Tempo
Não deixa resíduos		Fundições sem Contaminação
Cor Vermelha Opaca		Muito Fácil a Visualização

Instruções de Uso:

1. Aplique o isolante FuturaSep sobre as ligas metálicas ou modelos em gesso.
2. Coloque uma quantidade do líquido e do pó em recipientes separados.
3. Mergulhe o pincel no líquido e pegue uma pequena quantidade do pó.
Nota: Devido a micro granulação do pó, utilize mais pó do que líquido para melhores resultados.
4. Permita que o pó se umedeça .
5. Aplicar a resina na área de trabalho desejada.
6. Repita o passo 5 até que o trabalho esteja concluído.
7. Utilizar o sprue, o revestimento, efetuar a fundição e concluir todo o trabalho utilizando a mesma técnica da “cera perdida”.

Cor:

Vermelha

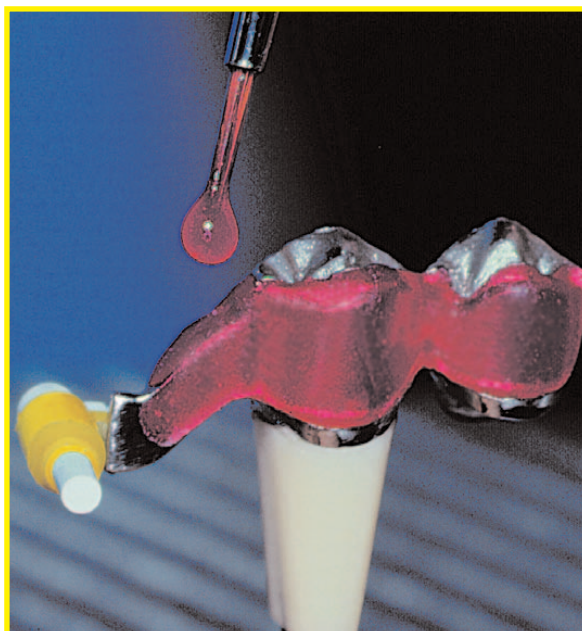



Cada kit contém 100g de pó e 100 ml de líquido

Order Number

Paint Acryl Set	629310
Paint Acryl Powder (100 g)	629325
Paint Acryl Liquid (100 ml)	629320



Schüt Dental mb

Dieselstraße 5-6 ☿ D-61191 Rosbach ☐ ☐ Germany

☐el.: 49 (0) 60 03 ☐ ☐14-0 ☿ Fax: 849 (0) 60 03 ☐ ☐14-906

www.schuet