

Tabela de Combinação de Cores Vision Low

Atualização: Jun/2011

Massas básicas

Cores	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaco	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Dentina Opaca	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD	OD
	OD White OD Honey															
Dentina	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Incisal	I 58		I 59		I 60	I 57	I 59			I 60	I 59		I 60		I 59	
Transparentes	TR Red TR Clear TR Neutral TR Yellow TR Grey															

Recursos de caracterização

Modificadores de opaco	Orange Yellow Brown
Incisais Opalescentes	OI Neutral OI Blue
Incisais Intensivos	II White II Yellow
Cerâmica de ombro	SM Creme SM Yellow SM Red Brown
Gengiva	Pink Soft Pink

Cores para dentes clareados

Opaco	O Bleach		
Dentina	D Bleach 1	D Bleach 2	D Bleach 3
Incisal	I Bleach		

Stains

Glaze Blue Grey Olive Honey Chestnut Redbrown White	Cromatizadores A B C D
---	--

Porcelana de Ombro

Para alcançar as 16 cores em massa de ombro é necessário efetuar a mistura das massas, conforme sugerido pela Wohlwend

Cor	Combinação sugerida
A1	Creme
A2	Creme
A3	Creme (70%) + Yellow (30%)
A3,5	Redbrown (90%) + Yellow (10%)
A4	Redbrown
B1	Creme
B2	Creme (90%) + Yellow (10%)
B3	Creme (20%) + Yellow (80%)
B4	Yellow (50%) + Redbrown (50%)
C1	Creme
C2	Creme (80%) + Redbrown (20%)
C3	Creme (20%) + Redbrown (80%)
C4	Redbrown
D2	Redbrown (50%) + Creme (50%)
D3	Redbrown (70%) + Creme (30%)
D4	Redbrown (60%) + Creme (10%) + Yellow (30%)