

Tabela de Queima Vision Classic

Atualização: Jun/2011

Etapa	Temperatura Inicial	Tempo de secagem	Aumento de temperatura	Temperatura final	Tempo de permanência no forno	Tempo de descida	Vácuo	Aparência
Primeira queima de opaco	450°C	3 min.	80°C/min	970°C	1 min.	1 min.	sim	Brilho leve
Segunda queima de opaco	450°C	3 min.	60°C/min	950°C	1 min.	1 min.	sim	Brilho leve
Porcelana de ombro	450°C	4 min.	45°C/min	940°C	1 min.	1 min.	sim	Brilho leve
Primeira queima de dentina	450°C	6 min.	45°C/min	920°C	1 min.	1 min.	sim	Brilho leve
Segunda queima de dentina	450°C	6 min.	45°C/min	910°C	1 min.	1 min.	sim	Brilho leve
Glaze (pó + liq. de glaze)	450°C	2 min.	80°C/min	800°C	1 min.	1 min.	não	Brilhante