

# Tabela de Queima Vision Zircon

Atualização: Jun/2011

## Maquiagem

Etapa	Temperatura Inicial	Tempo de secagem	Aumento de temperatura	Temperatura final	Tempo de permanência no forno	Tempo de descida	Vácuo	Aparência
Prensagem Liner	450°C	2 min.	55°C/min	900°C	1 min.	4 min.	sim	
Queima de Fixação (pintura com stains)	450°C	4 min.	45°C/min	810°C	1 min.	4 min.	não	Brilho leve
Queima de Glaze (pó + liq. de glaze)	450°C	4 min.	45°C/min	800°C	1 min.	4 min.	não	Brilhante

## Estratificação

Etapa	Temperatura Inicial	Tempo de secagem	Aumento de temperatura	Temperatura final	Tempo de permanência no forno	Tempo de descida	Vácuo	Aparência
Liner	450°C	4 min.	55°C/min	800°C	1 min.	4 min.	sim	
Porcelana de Ombro	450°C	4 min.	45°C/min	830°C	1 min.	4 min.	sim	Brilho leve
Primeira queima de dentina	450°C	6 min.	45°C/min	810°C	1 min.	4 min.	sim	Brilho leve
Segunda queima de dentina	450°C	6 min.	45°C/min	800°C	1 min.	4 min.	sim	Brilho leve
Glaze (pó + liq. de glaze)	480°C	2 min.	45°C/min	800°C	1 min.	4 min.	não	Brilhante